





PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación que dese. Si este producto presentara defectos dentro del período de garantía indicado anteriormente, el único remedio y la única obligación de 3M ESPE, será el reemplazo o reparación del producto 3M ESPE.

Limitación de Responsabilidades

Excepto en los casos en los que la ley lo prohíba, 3M ESPE no será responsable de ninguna pérdida o ningún daño que surja por causa del producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o emergentes, sin importar la teoría que se sostenga, incluso garantía, contrato, negligencia o estricta responsabilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Use By | Caution, see instructions for use | Storage | Do Not Reuse |
| Utiliser avant le | Précautions à prendre, consulter les directives d'utilisation | Entreposage | Ne pas réutiliser |

VITAPAN® is a registered trademark of VITA Zahnfabrik.

3M ESPE Customer Care/MSDS Information:
U.S.A. 1-800-634-2249 and Canada 1-888-363-3685.

3M ESPE
Dental Products
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA

2015-10
3M, ESPE, Filtek, Vitrebond, Elipar and Sol-Lex are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada.
© 3M 2015. All rights reserved. 44-0007-7681-3-A